



Desinfeksjon, - Varmedesinfeksjon (spylers/vaskemaskin)

D07372

 Utgave:
5.02

 Gjelder fra:
07.07.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Uskadeliggjøre mikrober på utstyr og hindre smitteoverføring. Omfatter alle brukte instrumenter og utstyr i kontakt med kroppsvæsker (eks. blod, urin, avføring).

Ansvar/målgruppe

De som [bruker og håndterer](#) medisinsk utstyr.

Handling

Varmedesinfeksjon er den beste, sikreste og billigste metoden, å desinfisere utstyr på. Dvs å bruke spyle- eller vaskedekontaminator (bekkenspyler og vaskemaskin).

Dette er viktig for begge maskiner:

- Brukt utstyr settes direkte i maskinen for å hindre smittespredning og inntørking av organisk materiale.
- Plassér utstyret riktig slik at alle flater blir rene.
- Den som tar rent gods ut av maskinen, skal kontrollere at godset er synlig rent. Hvis utilstrekkelig vaskeprosess eller tekniske problemer, skal vedkommende ta ansvar for å rette opp eller eventuelt melde feil til den som er ansvarlig for maskinen (vaktmester eller eventuelt leverandør).
- Desinfisert utstyr skal settes rett fra dekontaminator inn i skap eller på rent lager.
- [Daglig sjekk av maskiner](#) skal dokumenteres.
- Årlig teknisk kontroll skal dokumenteres og oppbevares ved maskinen.

Husk: utfør [håndhygiene](#) mellom kontakt med rent og urent utstyr.

Spesielt om spyledekontaminator (bekkenspyler):	Spesielt om vaskedekontaminator (instrumentvaskemaskin):
brukes til bekken, urinflasker, bøtter o.l. Desinfeksjon ved >85°C i 1 min. <ul style="list-style-type: none"> • NB! Maskinen skal brukes som utslagsvask. 	brukes til vaskefat, boller, instrumenter o.l. Såpe, desinfeksjon ved >85°C i minst tre minutter. <ul style="list-style-type: none"> • NB! Maskinen må ikke brukes som utslagsvask. Når maskinen skal brukes: <ul style="list-style-type: none"> • Fjern evt. forurensning på sila i bunnen av maskinen. • Sjekk at spylearmene roterer fritt etter at utstyret er plassert • Sjekk at det er vaskemiddel.

Referanser

[EX.01.02-01](#)
[Basale smittevernrutiner](#)

Utgave: 5.02	Desinfeksjon, - Varmedesinfeksjon (spyler/vaskemaskin)	D07372 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

[EX.01.02-02](#)

[Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask](#)

[EX.01.02-03](#)

[Basale smittevernrutiner - Usterile engangshansker](#)

[EX.01.13-16](#)

[Skyllerom- arbeid i desinfeksjonsrom](#)

[EX.01.13-17](#)

[Skyllerom - desinfeksjonsrom, sjekklister og sjekklister for opplæring på vaske og spyledekontaminator](#)

- BM Andersen (red), Håndbok i hygiene og smittevern sykehjem og langtidsinstitusjoner, Ullevål Universitetssykehus 2013