



Renhold av datautstyr og medisinsk teknisk skjermutstyr

D32876

Utgave:
3.00Gjelder fra:
14.07.2020

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

Å sikre regelmessig rengjøring av datautstyr for å hindre smitteoverføring via hender. Dette omfatter alle deler til datautstyr og medisinsk-teknisk skjermutstyr.

Ansvar/målgruppe

Avdelingsledelsen har ansvar for å gjøre denne prosedyren kjent for alle som bruker eller rengjør datautstyr.

Den enkelte har ansvar for å følge prosedyren i praksis.

Handling

Ved innkjøp av datautstyr: anbefales det å anskaffe tastatur og mus som tåler rengjøring og desinfeksjon.

Daglig renhold er påkrevet når flere bruker samme utstyr.

Ukentlig renhold er tilstrekkelig når bare en bruker utstyret.

Mobiltelefoner/nettbrett/ og lignende

Det skal utføres daglig desinfeksjon av dette utstyret.

Tastatur / mus rengjøres av pc-bruker

Ved spesielt urent tastatur: tørk av med en fuktig klut med nøytralt renholdsmiddel.

Rengjøring/desinfeksjon kan gjøres på følgende måter:

- Spesielle servietter eller spray til datautstyr
- Desinfeksjonsservietter til overflatedesinfeksjon.

Bruk våtserviett eller en spesiell renseserviett (den skal være fuktig i pakken) på tastatur, mus og skjerm. Bruk evt. flere servietter til tastaturet er rent. Tørre servietter har ingen renseeffekt.

Kjermflate rengjøres av pc-bruker

Tørk over skjermen med desinfeksjonsservietter til overflatedesinfeksjon eller bruk spesiell serviett/spray for skjermflater.

Øvrig datautstyr (hvit/grå plast) rengjøres av renholdspersonell

Tørk av med en fuktig klut med nøytralt renholdsmiddel.