



Fødeseng - Rengjøring og desinfeksjon

D49349

 Utgave:
1.02

 Gjelder fra:
29.07.2024

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

Hindre smitteoverføring fra fødesenger og tilhørende utstyr til pasienter, personale og miljø.

Ansvar/målgruppe

Personale som vasker og desinfiserer og fødesenger.

Handling

- Fødesenger skal alltid rengjøres og desinfiseres mellom hver pasient.
- Utfør håndhygiene før det tas på beskyttelsesfrakk og nitril engangshansker. Ved fare for sprut/søl; bruk munnbind og øyebeskyttelse.
- Sørg for at senga er trukket helt ut slik at man kommer til overalt.
- Bruk mikrofiberkluter og start ved hodegjerdet og avslutt i fotenden
- Desinfiser madrassen på begge sider. Ved sprekker i madrass og væske har trukket inn bør den kastes.
- Ved synlig søl av blod og andre kroppsvæsker på seng/madrass utfør flekkdesinfeksjon før rengjøring av hele sengen/madrassen:
 - Virkon og PeraSafe har virketid 10 minutter.
- Ta av engangshansker og frakk og avslutt med håndhygiene.
- Tørk over med en ren fuktet klut etter endt virketid.
- Utstyr og kluter er urent skal desinfiseres. Følg rutiner på eget arbeidssted.
- Minst en gang pr. måned kjøres fødesengen til sengesentralen for desinfeksjon i sengevaskemaskin, der dette er tilgjengelig.

Toalett og dusj

Desinfiseres med PeraSafe (evt. Virkon) etter fødesenga. Hvis dette gjøres i motsatt rekkefølge må den som utfører desinfeksjonen skifte hansker og frakk før rengjøring av fødeseng.

Hjul på fødesenga

Serviceavtale med leverandør en gang i året anbefales, da dekslene ikke enkelt kan demonteres.

Referanser

[SI/17.34-01](#)
[SI/17.34-02](#)
[SI/22.07.01-01](#)
[SI/22.07.01-02](#)
[SI/22.07.01-03](#)
[Hånddesinfeksjon](#)
[Håndvask](#)
[Desinfeksjonsmidler - kjemiske \(tabell\)](#)
[Virkon - Blandingsprosedyre](#)
[PeraSafe - Blandingsprosedyre](#)