



Peritonealdialyse - Brukerkrav til PD maskin Homechoice Claria, Baxter

D52246

Utgave:
1.00Gjelder fra:
30.01.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre at krav til bruk av Homechoice Claria, Baxter blir gjennomgått, bekreftet og registrert årlig
- Dialysemaskiner kategoriseres som kritisk utstyr
- Dokumenteres i Kompetanseportalen

Ansvar/målgruppe

- Ressurspersoner på dialyseavdelingen

Handling

Gå igjennom og registrere brukerkrav

- Kan finne fram i brukermanualen og Kvalitetssystemet
- Har kjennskap til strømtilførsel og av- og på bryter
- Kan plassere maskin i forhold til pasient og seng
- Kan finne fram utstyr og gjøre nødvendige forberedelser
- Kan klargjøre poser
- Kan starte maskin og taste inn aktiveringskode
- Kan finne helsepersonell meny, endre mellom «enkelt bruker» og «sykehus»
- Kan bruke maskin uten nettverkstilkobling
- Kan gjøre endringer i et program via maskin
- Kan bekrefte innstillinger og program
- Kan installere slangesett, koble til poser og plassere rett pose på rett sted og fylle slangesett
- Kan koble til tømme-slange/pose
- Kan sjekke at pasientslangen er helt fylt og eventuelt etterfylle før påkobling
- Kan koble til pasient og starte behandling
- Kan håndtere alarmer og kunne iverksette tiltak
- Kan gjøre tiltak ved tømingsproblemer
- Kan starte et manuelt utløp, stoppe/pause behandlingen, midlertidig frakopling og avbryte behandlingen
- Kan avslutte behandlingen og koble fra pasient
- Kan håndtere strømbrudd
- Kjenner til rengjøring og vedlikehold

Utgave: 1.00	Peritonealdialyse - Brukerkrav til PD maskin Homechoice Claria, Baxter	D52246 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

Referanser

SI/12.01-04	Medisinsk teknisk utstyr (MTU) - Dokumentasjon som skal være tilgjengelig
SI/12.03.03.02-04	Brukermanual HomeChoice Claria Feilsøkingssguide
SI/12.03.03.02-05	Brukermanual HomeChoice Claria
SI/19.02-03	Medisinsk teknisk utstyr (MTU) - Opplæring og dokumentasjon