



## Hemodialyse - Brukerkrav, Fresenius 6008 hemodialysemaskin

D52250

 Utgave:  
1.00

 Gjelder fra:  
30.01.2023

Side 1 av 2

### Hensikt og omfang

- Sikre at krav til bruk av Fresenius 6008 blir gjennomgått, bekreftet og registrert årlig
- Dialysemaskiner kategoriseres som kritisk utstyr
- Dokumenteres i Kompetanseportalen

### Ansvar/målgruppe

- Ressurspersoner på dialyseavdelingen

### Handling

#### Gå igjennom og registrere brukerkrav

- Kan finne fram i brukermanual og kvalitetssystemet
- Er kjent med strømtilkobling og batteridrift
- Er kjent med vanntilkobling og avløp
- Kan starte T1-test, koble til dialysat (kanne, CNS) og bibag
- Kan koble opp slangesett og filter
- Kan prime online og eventuelt med NaCl
- Kan benytte, programmere og lagre på pasientkort
- Kan navigere i behandlingsmeny og pasientkort
- Kan legge inn tid, UF-mål og eventuelt UF-profiler ISO-UF
- Kan stille inn dialysat, natrium, bikarbonat og temperatur, temperaturkontroll (BTM) og resirkulasjonsmåling
- Kjenner til innstilling og avlesing av OCM og Kt/V registrering
- Kjenner til blodtrykksmåling, sette intervall og justere alarmgrenser.
- Kjenner til BVM registrering og tolking av kurven
- Kjenner til innstillinger, funksjon og kritisk rBV ved BVM kontroll
- Kjenner til indikasjon og funksjon av akutt-knappen, gi bolus online og sette tilbake i behandlingsmodus
- Kan åpne veneporten
- Kjenner til ulike type alarmer (grønn, gul, rød)
- Kan justere alarmgrenser, kjenner til tiltak ved lavt arteriestrykk, høyt venetrykk og høy TMP
- Kjenner til håndtering og tiltak ved VAM alarm
- Kan håndtere alarmer for mikrobobler og luft nedenfor veneboblefellen
- Kan håndtere blodlekkasjealarmer og vet jeg skal kaste settet ved reel blodlekkasje
- Kan sette i sirkulasjon, by-pass-modus
- Kan skifte bibag under behandling
- Kjenner til innstillinger og observasjoner ved Single Needle

- Kan skru på lys for å inspisere kammerene.
- Kan starte reinfusjon, også før behandlingstid er oppnådd, både med online closed circuit, online og NaCl
- Kan gi manuell reinfusjon ved strømbrydd ved bruk av håndsveiv med riktig retning.
- Kan tømme kassett og filter og koble av slangesettet, starte rengjøringsprogram og kjenne til krav til frekvensen av gjennomført rengjøringsprogram og integrert rengjøringsprogram.
- Kjenner til rengjøring av maskin daglig og månedlig, samt ved blodsmitte/ukjent immunstatus
- Kan åpne dør manuelt
- Kan skifte citrosteril
- Kjenner til utførelse og kriterier for bytte av DiaSafe filter

#### Referanser

[SI/12.01-04](#)

[Medisinsk teknisk utstyr \(MTU\) - Dokumentasjon som skal være tilgjengelig](#)

[SI/12.03.07.03-01](#)

[Brukermanual Fresenius 6008](#)

[SI/19.02-03](#)

[Medisinsk teknisk utstyr \(MTU\) - Opplæring og dokumentasjon](#)