



Skyllerom - desinfeksjonsrom, sjekkliste og sjekkliste for opplæring på vaske og spyledekontaminator

D19914

Utgave:
4.02

Gjelder fra:
15.05.2024

Side 1 av 2

DAGLIGE oppgaver	UKENTLIGE oppgaver
Sjekk vask- og spyledekontaminator: - alle vaskearmer er på plass - vaskearmer roterer fritt og at dysene er åpne - bunnfilteret er rent - klappventiler fungerer - det ikke mangler deler i innsats - At det er tilstrekkelig såpe/avspenningsmiddel, at de er riktig montert og merket med nivå og dato - rengjør arbeidsbenk, maskiner utvendig, dørhåndtak, og blandebatteri med desinfeksjonssprit 75%. Ved synlig søl, bruk Virkon eller Pera-Safe.	- Rengjør maskin og dørpakninger, skapdører, hyller og vegg bak arbeidsbenk. - Vaskearmer skrues ut og rengjøres.

Skriv signatur i rute for utført oppgave.

Årstall:

Uke: _____	Ma	Ti	Ons	To	Fre	Lør	Søn	Tiltak
Daglige oppgaver utført:								
Ukentlige oppgaver								

Uke: _____	Ma	Ti	Ons	To	Fre	Lør	Søn	Tiltak
Daglige oppgaver utført:								
Ukentlige oppgaver								

Uke: _____	Ma	Ti	Ons	To	Fre	Lør	Søn	Tiltak
Daglige oppgaver utført:								
Ukentlige oppgaver								

Uke: _____	Ma	Ti	Ons	To	Fre	Lør	Søn	Tiltak
Daglige oppgaver utført:								

Ukentlige oppgaver

Utfylt sjekkliste oppbevares i avdelingens perm for resultatdokumentasjon.

Desinfeksjonsrom- sjekkliste for opplæring på vaske- og spyledekontaminator

Ansatte i avdelingen har krav på å få riktig opplæring i bruk av vaske- og spyledekontaminator

Ansvar:

Avdelingssykepleier/ leder.

1. Har fått informasjon om kvalitetssystemet og hvor prosedyrene finnes Ja ☐ Nei ☐
2. Har gjort seg kjent med programvalg Ja ☐ Nei ☐
3. Kan skifte såpekanne og evtelt kanne for avspenningsvæske Ja ☐ Nei ☐
4. Har lært å stenge vanninntak Ja ☐ Nei ☐
5. Har lært riktig plassering av gods for å oppnå sikker rengjøring og desinfeksjon av utstyret. Ja ☐ Nei ☐
6. Har fått demonstrert bruken av de forskjellige innsatser som tilhører gjeldende maskiner. Ja ☐ Nei ☐
7. Har fått gjennomgang av maskinens funksjon, tekniske opplysninger og logging av feilmeldinger! Ja ☐ Nei ☐
8. Har fått opplæring i bruk av rengjøringstester til vaskedekontaminator Ja ☐ Nei ☐
9. Har fått opplæring i daglige- og ukentlige oppgaver i desinfeksjonsrom Ja ☐ Nei ☐

Signatur

Dato

Signatur avdelingssykepleier / -leder

Sjekklisten arkiveres hos leder.