



Fødebadekar- Rengjøring, desinfeksjon og prøvetaking

D38580

Utgave:
2.04Gjelder fra:
23.02.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Hindre oppvekst av mikroorganismer i badekar og hindre overføring av bakterier og virus til kvinne/barn ved bruk av fødebadekar.
- Prosedyren omfatter badekar i fødeavdelinger.

Ansvar/målgruppe

- Jordmødre, barnepleiere og renholdspersonale ved fødeavdelingene

Handling

- Badekaret skal ikke benyttes til oppbevaring av sengetøy og annet utstyr under fødsel. Dette må da anses som kontaminert, badekaret ses på som brukt selv om det ikke har vært benyttet av fødepasient.
- Desinfiser alltid fødebadekaret med desinfeksjonssprit 75%, la virke i 2 min, før kvinnen går opp i badekaret

Rengjøring av fødebadekar etter bruk

- Benytt usterile engangshansker, væsketett beskyttelsesfrakk og ev. munnbind
- Tøm badekaret for vann
- Fjern blod- og avføringsrester før spyling, kast dette i wc eller som smitteavfall
- Skyll badekaret grundig med kaldt vann
- Skru av dusjhode, sil og bunnpropp, skyll i rennende vann og legg delene i vaskedekontaminator
- Vask først med våtromssåpe og klut. Skyll med varmt vann.
- Desinfiser badekarets overflate med Perasafe. Bruk en ren klut/engangsklut og følg prosedyren [PeraSafe - Blandingsprosedyre](#). La virke i 10 min.
- Snu avløpsrøret under badekaret med åpningen opp og fyll sluket med Perasafe-blandingen. La virke i 10 minutter og skyll av.
- NB! Plasser avløpsrøret riktig vei før videre rengjøring
- Etter endt virketid; skyll fødebadekaret
- Tørk fødebadekaret og dusjdelene med rent håndkle til slutt, og monter delene
- Luken under badekaret skal stå åpent for lufting når det ikke er i bruk

Miljøprøver

- Miljøprøver (bakterieprøver) av fødebadekar er ikke lenger nødvendig å utføre rutinemessig
- Prøvetaking kan vurderes ved svikt i rutiner eller etter uønskede hendelser i samråd med Seksjon smittevern
- Vurdér å ta miljøprøver ved
 - svikt i renholdsrutiner

Utgave: 2.04	Fødebadekar- Rengjøring, desinfeksjon og prøvetaking	D38580 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

- uventet funn av patogene mikrober hos mor/barn som har benyttet fødebadekar
- ved infeksjonsutbrudd hos mor/barn i avdelingen

- Miljøprøvene tas med e-swab på disse punktene
 - fra overflate badekar
 - fra propp, sil i vannkran og dusjhode
 - fra sluk; NB prøve tas over vannspeilet
 - Prøvene sendes Avdeling for Mikrobiologi SI Lillehammer

Ved positive bakteriefunn

- Desinfiser badekaret med PeraSafe på nytt før det tas i bruk igjen
- Ta kontakt med hygiesykepleier eller smittevernkoordinerende lege ved bakterievekst

Referanser

[SI/22.07.01-03](#)

[PeraSafe - Blandingsprosedyre](#)

OUS Ehboken. Vannfødsel og bruk av badekar under fødsel. [Internett] [Hentet 23.02.2023]
Tilgjengelig fra: <https://ehandboken.ous-hf.no/document/4494>