

Legemidler - Kanyleoversikt, opptrekkskanyler, injeksjonskanyler og filtre

D50355

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
25.03.2021

Side 1 av 4

Oversikt over opptrekkskanyler og kanyler til injeksjon

Opptrekkskanyler			
Farge	Dimensjon	Bilde	Bruksområde
Rød	18G x 40 mm		Opptrekk fra hetteglass. Spissen er skjært i 45°. Reduserer faren for at gummi blir med fra hetteglassmembranen.
Lilla	18G x 40 mm m/5µ filter		Opptrekk fra glassampuller. Har filter på 5µ som reduserer risiko for å ta med glasspartikler etter åpning av glassampuller.
Filterstrå	10 cm m/5µ filter		Opptrekk fra ampulle. Bøybar gummislange. Med filter (5µ).
Minispikes fra B-Braun 5µ filter			Kan brukes ved behov for flere opptrekk fra samme hetteglass/ EcoFlac beholder. Eller ved opptrekk av store volum. Med filter (5µ).

Injeksjonskanyler som kan brukes til opptrekk			
Grønn	21G x 40 mm		Opptrekk og tilsetning. Anbefales brukt ved tilsetning av oppløsningsmiddel til hetteglass med tørrstoff der det er fare for skumming (for eksempel biologiske legemidler).
Rosa	18G x 40 mm		Kan brukes ved opptrekk. OBS: Ingen filter og kan skjære membran.
Beige	19G x 50 mm		Kan brukes ved opptrekk. OBS: Ingen filter og kan skjære membran.

Kanyler til injeksjon			
Farge	Dimensjon	Bilde	Bruksområde
Grønn	21G x 40 mm		Intramuskulært Subkutant lokalanestesi
Grønn	21G x 50 mm		Intramuskulært
Blå	23G x 25 mm		Subkutant
Oransje	25G x 16 mm		Subkutant

Utgave: 1.00	Legemidler - Kanyleoversikt, opptrekkskanyler, injeksjonskanyler og filtre	D50355 Side 2 av 4
-----------------	---	-----------------------

Oversikt over anbefalt bruk av opptrekkskanyler

Hetteglass med injeksjonsvæske eller injeksjonssubstans




Til hetteglass anbefales det bruk av rød opptrekkskanyle (for å minimere risiko for utstansing av propp), eventuelt grønn kanyle (21G).



Ved tilsetning av oppløsningsvæske til hetteglass med tørrstoff, der det er fare for skumming (for eksempel biologiske legemidler), anbefales grønn kanyle (21 G).


Hetteglass med store volum injeksjonsvæske

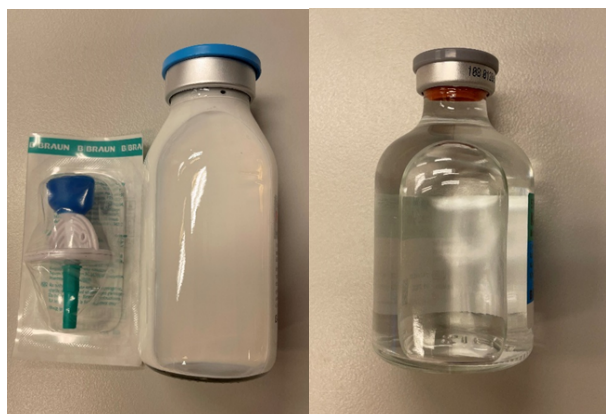

Ved opptrekk av store volum eller ved gjentatte opptrekk anbefales bruk av Minispike.


Utgave: 1.00	Legemidler - Kanyleoversikt, opptrekkskanyler, injeksjonskanyler og filtre	D50355 Side 3 av 4
-----------------	---	-----------------------

Glassampulle

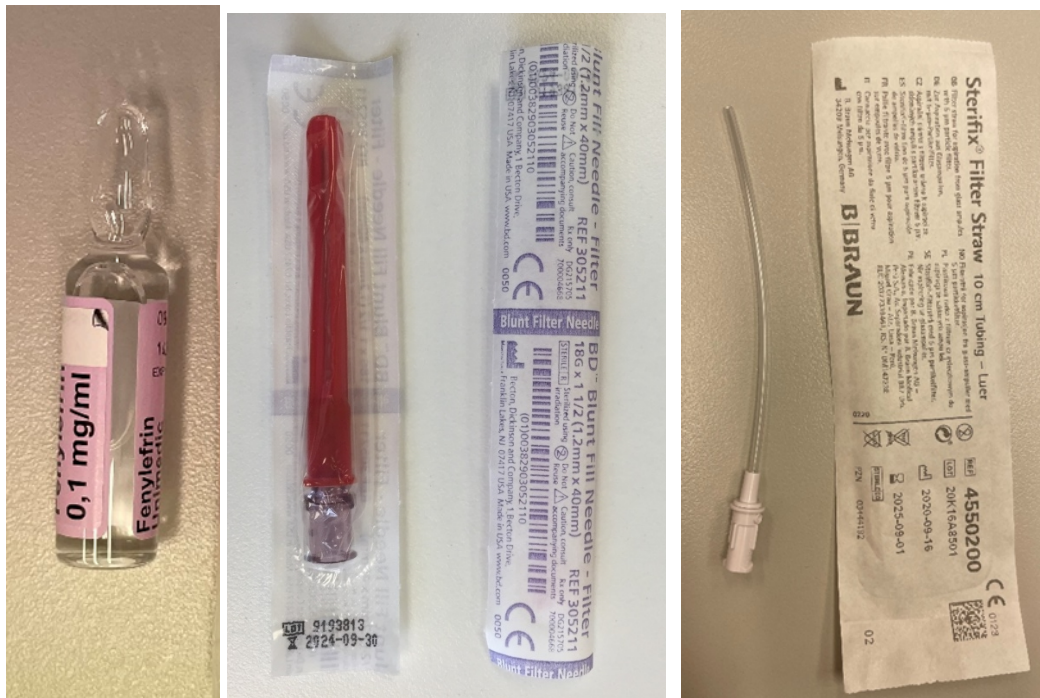

Til glassampuller anbefales opptrekk med kanyle med filter; lilla opptrekkskanyle eller filterstrå.

Plastampulle

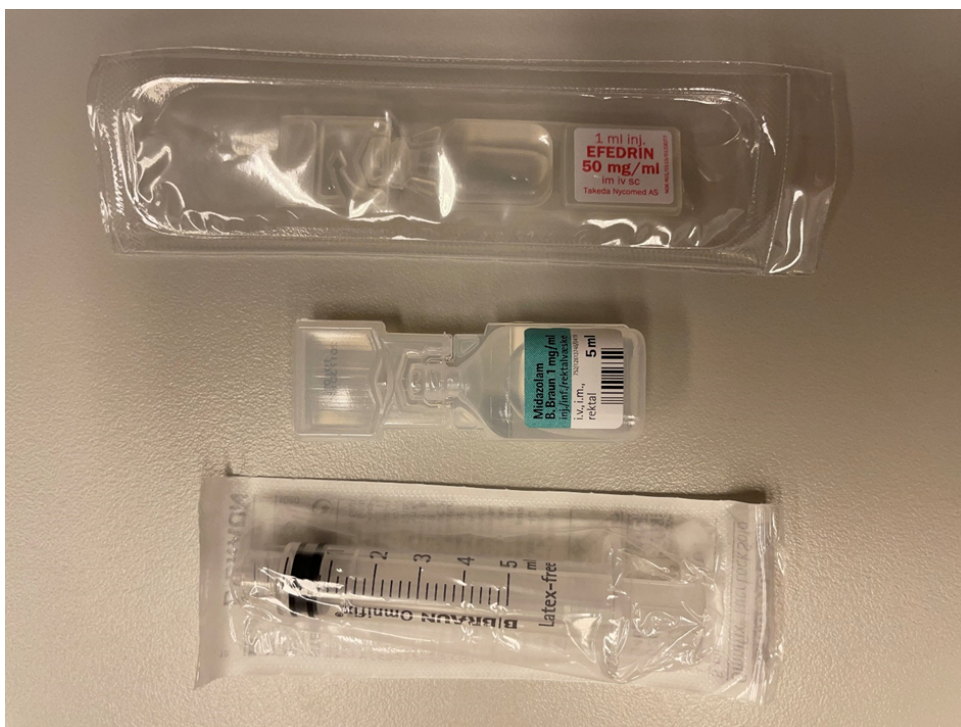

Ved opptrekk fra plastampulle kobles sprøyten direkte på ampullen. Om dette ikke er mulig eller hensiktsmessig kan man velge en av opptrekkskanylene i tabellen over. Filterstrå kan også benyttes.

Utgave: 1.00	Legemidler - Kanyleoversikt, opptrekkskanyler, injeksjonskanyler og filtre	D50355 Side 4 av 4
-----------------	---	-----------------------

Referanser

SI/17.34-01	Opptrekking av legemiddel fra ampulle
SI/17.34-02	Injeksjonsvæske fra hetteglass: opptrekking
SI/17.34-03	Opptrekking av pulver fra hetteglass ved bruk av opptrekkskanyle
SI/21.01-21	Legemidler - Tilberedninger og tilsetninger, administrering av legemidler til injeksjon og infusjon
SI/21.01-22	Legemidler - Veiledende brukstid etter anbrudd