



## Peritonealdialyse - APD, nattmaskin Baxter

D51088

 Utgave:  
1.02

 Gjelder fra:  
25.05.2023

Side 1 av 3

### Hensikt og omfang

- Sikre riktig forberedelse av nattmaskin, tilkobling og avslutning av behandling med Baxter sitt system for APD.
- Hindre uforutsette hendelser og komplikasjoner.

### Ansvar/målgruppe

- Sykepleiere og annet helsepersonell som jobber på sengepost, i sykehjem og hjemmesykepleie, samt pasienter og pårørende som får opplæring i APD.

### Handling

#### Utstyr

- Dialyseposer (jfr. ordinasjon)
- Slangesett
- Tømmeslange/-pose
- Koblingsdeksel
- Minicap
- Hånddesinfeksjonsmiddel; Antibac 75% med glycerol
- Antibac overflatedisinfeksjon 75%

#### Gjennomføring

- Lukk vinduer og dører, koble opp en stund etter at sengen er redd opp.
- Vask hendene.
- Tørk av maskin og utstyrsbord med Antibac overflatedesinfeksjon 75%.
- Åpne ytterposene på dialysevæska. Kontroller glucosekonsentrasjon, holdbarhet og volum, at væsken er klar og posene hele.
- Bryt alle forseglinger mellom posekamrene på 5 liter posene. 2,5 liter poser har en stift som knekkes og posen må henge for å blandes.
- Legg en pose, fortrinnsvis 5 liter, oppå maskinen, dvs. på varmeplata. La de andre posene henge/ligge i nærheten av maskinen, alle i samme høyde.
- Slå på maskinen. Vent til displayet viser «Hei...». Trykk grønn knapp. Maskinen kobler seg til nettverket. Dersom programmet er endret, viser displayet «*bekreft innstillinger*», bekreft med blå bekreftknapp, displayet viser så «*er du...*» bekreft igjen til displayet viser «*Er programmet riktig?*» trykk grønn knapp.
- \* Ved ny maskin eller hvis innlagt på sykehus gå til punket som omhandler «*På sykehus eller ved ny maskin*» før du fortsetter
- Når displayet viser «*Vekt*», tast inn dagens vekt ved hjelp av blå bekreftknapp og piltaster. Trykk rød knapp, displayet viser «*Trykk start*». Trykk grønn knapp.
- Displayet viser «*Innstaller slangesett*». Pakk ut slangesett, åpne luka og sett kassetten i maskinen. Skyv slangeklemmene litt opp eller ned, og steng alle klemmer.
- Trykk grønn knapp. Displayet viser «*Selvtesting*».

- Displayet viser «*Koble til posene/Åpne klemmene*» når selvtesting er ferdig
- Desinfiser hendene
- Koble slangen med rød klemme til posen på varmeplata. Slangen med blå klemme kobles til posen som skal inn til slutt. Det fremgår av skjema om det er en bestemt pose som skal inn sist. Det spiller ingen rolle hvilke slanger som kobles til hvilke poser. Utfør koblingene aseptisk. Dersom noe annet enn slangene berøres; desinfiser hendene på nytt.
- Når alle posene er koblet; knekk brytestiftene ved å klemme inn vingene på 5 liters poser og knekke grønn stift på 2,5 liters poser
- Åpne alle klemmer på slanger som har pose tilkoblet. Ubrukte slanger skal ha slangeklemma stengt. Åpne også slangeklemma på slangen helt til venstre i kasettholderen. Koble slangen helt til høyre i kasettholderen til tømme-slange eller tømmepose. Steng klemma på tømme-poses utløpsport.
- Trykk grønn knapp, displayet viser «*Fyller slangene*». Når fyllingen er ferdig, viser displayet «*Koble til pasienten/sjekk pasientslange*». Maskinen er klar til bruk. Ikke slå av maskinen.

### Sengetid og tilkobling

- Ta fram pasientslangen, tørk med Antibac overflatedesinfeksjon fra enden til og med klemmen
- Åpne pakken med koblingsdeksel
- Desinfiser hendene
- Koble slangen fra maskinen til pasientslangen. Sett på koblingsdeksel og skru opp klemmen på pasientslangen.
- Trykk grønn knapp, og behandlingen starter. Displayet viser «*Første tømning*».

### Avslutte behandlingen

Dersom displayet på morgenen viser «lav UF», sett deg opp på sengekanten. Trykk rød knapp og detter grønn knapp. Maskina fortsetter å tømme. Kommer meldingen «lav UF» opp på nytt, trykk rød knapp og deretter pil ned til det står «gå forbi» på displayet. Trykk så blå bekreftknapp og maskina starter «siste fylling».

- Displayet viser «*Behandling er ferdig*»
- Trykk pil ned for å se informasjon om gjennomført behandling
- Trykk grønn knapp, displayet viser «*Steng alle klemmer*». Skru igjen klemmen på pasientslangen og steng alle åpne klemmer.
- Trykk grønn knapp, displayet viser «*Koble fra pasienten*». Åpne ny MiniCap. Tørk av pasientkoblingen med antibac våtserviett. Desinfiser hendene. Koble kateterslangen fra pasientslangen og sett på MiniCap.
- Trykk grønn knapp, displayet viser «*Fjern kassetten*». Åpne døren til slangesettet og ta ut kassetten. Lukk døren.
- Trykk grønn knapp. Displayet viser «*Kobler til nettverk*».
- Når data er overført viser displayet «*Slå av maskinen*».

**\*På sykehus eller ved ny maskin:**

Utgave: 1.02	<b>Peritonealdialyse - APD, nattmaskin Baxter</b>	D51088 Side 3 av 3
-----------------	---	-----------------------

- Etter at maskinen er slått på viser displayet «*Angi aktiveringskode*»
- Tast inn kode ved å bruke blå bekreftknapp og piltaster
- Trykk grønn knapp og «*Maskinen kobler seg til nettverket*»
- Displayet viser «*Bekreft innstillinger*». Dette gjøres ved å bruke blå bekreftknapp til displayet viser «*Er programmet riktig*».
- Bekreft med grønn knapp
- Fortsett handling fra punktet nedenfor \* i Gjennomføring: «*Når displayet viser «Vekt»...*»

## Referanser

<a href="#">SI/12.03.03.02-06</a>	<a href="#">Brukermanual HomeChoice Claria veileder hjemmepasienter</a>
<a href="#">EX.01.02-01</a>	<a href="#">Basale smittevernrutiner</a>
<a href="#">EX.01.02-02</a>	<a href="#">Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask</a>