

## Peritonealdialyse - Brukerkrav til PD maskin Fresenius Sleep Safe Harmony

D52247

Utgave:  
1.01Gjelder fra:  
30.01.2023

Side 1 av 1

### Hensikt og omfang

- Sikre at krav til bruk av Fresenius Sleep Safe Harmony blir gjennomgått, bekreftet og registrert årlig
- Dialysemaskiner kategoriseres som kritisk utstyr
- Dokumenteres i Kompetanseportalen

### Ansvar/målgruppe

- Ressurspersoner på dialyseavdelingen

### Handling

#### Gå igjennom og registrere brukerkrav

- Kan finne fram i brukermanualen og Kvalitetssystemet
- Har kjennskap til strømtilførsel og av- og på bryter
- Kan plassere maskin i forhold til pasient og seng
- Kan sette inn pasientkort og starte maskin
- Kan finne fram utstyr og gjøre nødvendige forberedelser
- Kan gjøre eventuelt en systemsjekk
- Kan velge forordning
- Kan klargjøre poser
- Kan koble opp maskinen ved å følge instruksjoner på maskinen (slangesett, plassere koblinger, tømmeslange/pose)
- Kan sjekke at pasientslangen er helt fylt og etterfylle før påkobling
- Kan koble til pasient og starte behandling
- Kan håndtere alarmer og kunne iverksette tiltak
- Kan gjøre tiltak ved tømningproblemer
- Kan starte et manuelt utløp, stoppe/pause behandlingen, midlertidig frakopling og avbryte behandlingen
- Kan avslutte behandlingen og koble fra pasient
- Kan håndtere strømbrudd
- Kjenner til rengjøring og vedlikehold

### Referanser

[SI/12.01-04](#)[Medisinsk teknisk utstyr \(MTU\) - Dokumentasjon som skal være tilgjengelig](#)[SI/12.03.07.03-06](#)[Brukermanual Sleep-Safe Harmony](#)[SI/12.03.07.03-07](#)[Brukermanual kort Sleep-Safe Harmony](#)[SI/19.02-03](#)[Medisinsk teknisk utstyr \(MTU\) - Opplæring og dokumentasjon](#)